

BASTON ORTOPEDIC CU PATRU PUNCTE DE SPRIJIN CU BAZA REDUSA

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Nota: Pentru utilizarea corecta a dispozitivelor medicale destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii, in vederea recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice cereti sfatul medicului ortoped sau kineto-terapeut.

Dispozitivul medical **BASTON ORTOPEDIC CU PATRU PUNCTE DE SPRIJIN** face parte din clasa dispozitivelor de mers si este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, in scopul ajutorarii si remedierii deficientelor .

Dispozitivul medical **BASTON ORTOPEDIC CU PATRU PUNCTE DE SPRIJIN**, confectionat din aluminiu, este usor de utilizat, nu este incomod, putandu-se ajusta in functie de dimensiunea anatomica a utilizatorului.

Pentru realizarea acestui reglaj, se apasa cu doua degete opritorii metalici pana cand tija bastonului se elibereaza. Apoi se pozitioneaza la inaltimea dorita , dupa care se elibereaza opritorii metalici, bastonul fixandu-se automat la inaltimea dorita. Bastonul are un sistem de blocare dupa reglarea la inaltimea dorita. Functie de varianta constructiva acesta poate fi de forma unui colier cu un surub de fixare sau colier cu filet interior.

Fiecare baston de acest tip are in dotare pentru fiecare picior de un varf de cauciuc care impiedica alunecarea. Dupa utilizarea bastonului o lunga perioada de timp, aceste pufere de cauciuc se pot uza. De aceea se recomanda verificarea periodica a gradului de uzura a acestor pufere de cauciuc in vederea schimbarii acestora cu unele noi

Nu se recomanda utilizarea bastoanelor a caror pufere de cauciuc sunt tocite sau sunt tocite neuniform, acest aspect conducand la pierderea aderenței, instabilitate

Reglajul corect al inaltimii bastonului

Modul de reglaj standard este urmatorul:

Pacientul sta in pozitie verticala, se asaza bastonul pe langa corpul acestuia, se regleaza inaltimea bastonului astfel incat manerul sa fie in dreptul incheieturii mainii pacientului.

Nu depasiti greutatea maxima de utilizare indicata de fabricant!

Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda , dupa care se sterge cu o carpa uscata. Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare. Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.

Baston ortopedic cu patru picioare si baza redusa Reglaj si utilizare

Reglaj in inaltime



Reglaj in inaltime

Marirea inaltimii bastonului

Se desurubeaza 2-3 ture inelul de siguranta

Se apasa butonul de reglaj in inaltime si se trage partea cu baza bastonului pana cand butonul de siguranta intra in urmatorul orificiu de blocare. Se repeta operatia pana cand se obtine inaltimea dorita

Micsorarea inaltimii bastonului

Se desurubeaza 2-3 ture inelul de siguranta

Se apasa butonul de reglaj in inaltime si se impinge partea cu baza bastonului pana cand butonul de siguranta intra in urmatorul orificiu de blocare. Se repeta operatia pana cand se obtine inaltimea dorita

Dupa reglare se strange inelul de siguranta

Inaltimea corecta: utilizatorul in pozitie verticala, mana pe langa corp, bastonul asezat pe pardoseala, manerul bastonului trebuie sa ajunga la incheietura mainii.

Reglarea pentru utilizare cu mana dreapta sau cu mana stanga

Imaginea de mai sus este pentru un baston cu 4 picioare configurat pentru utilizare cu mana dreapta, partea mai plata a bazei vine catre piciorul drept al utilizatorului.

Daca dorim sa il configuram pentru mana stanga procedam astfel:

Slabim 2-3 ture inelul de siguranta

Apasam butonul de reglaj in inaltime si invartim manerul bastonului cu 180 grade pana cand butonul de reglaj iese din nou in orificiul de blocare.

Strangem inelul de siguranta

In figura de mai jos este configurat bastonul pentru utilizare cu mana stanga.

