

## Fotoliu rulant cu antrenare manuala model RX954 Mod de utilizare



fig.1

1. inaltator de spatari, este detasabil
2. suport de sprijin cap (tetiera) se fixeaza pe benzi velcro (arici) la inaltimea dorita
3. manere pentru deplasarea fotoliului de catre insotitor
4. levier pentru reglajul pozitiei spatariului de la pozitia verticala pana la cea orizontala
5. spatariul fotoliului, tapiterie lavabila
6. Suport sprijin pentru brate, detasabil pentru a lasa libera laterala scaunului cu rotile in vederea transferului pe si de pe scaun
7. sezutul fotoliului, tapiterie lavabila
8. suport pentru sprijinul gambelor, placat cu burete si piele sintetica
9. sistemul de reglare in inaltime in 3 trepte pentru sprijinului de gamba "8"
10. suport de sprijin al talpilor, inainte de asezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuia de pe fotoliu, **suportii de sprijin al talpilor se ridica la verticala**, daca utilizatorul calca direct cu toata greutatea pe acesti suporti, fie fotoliul se rastoarna peste el sau suportii se rup.
11. Roata fata, diametrul 20 cm
12. sistemul de ridicare coborarea pe verticala a intregului suport de sprijin al picioarelor
13. sistemul de franare, pe fiecare roata spate, orice operatie de ridicare sau asezarea pe scaunul cu rotile se face cu franele actionate pe ambele roti din spate
14. sistemul de blocare - deblocare a suportului de sprijin brat pentru a elibera laterala fotoliului rulant in vederea transferarii utilizatorului
15. rotile spate, pneuri pline, spite subtiri din otel, inele de autotractare atasate rotilor spate, utilizatorul apuca ambele inele si le trage sau

impinge determinand deplasarea fotoliului inainte sau inapoi; daca se actioneaza un singur inel fotoliul va coti in aceeasi directie, mai clar daca trage de inelul din dreapta fotoliul va vira catre dreapta.

### **Pregatirea scaunului cu rotile pentru utilizare**

Popular denumirea este "scaun cu rotile" ca definitie a dispozitivului medical avem "fotoliu rulant cu antrenare manuala". Extrageți scaunul din ambalaj și așezați-l cu roțile pe pardoseala. Scaunul este pliat (strans) pentru a ocupa un spațiu mai mic. Pentru a depia scaunul se procedează ca în figura 2:



fig.2

Apasați cu ambele palme pe directia "a" indicata in figura 2 pana cand sezutul și spatarul fotoliului rulant se vor intinde. Suportii de sprijin al picioarelor, este cate unul pentru fiecare parte stanga – dreapta a scaunului. Fiecare suport are 2 orificii de ghidare și corespondent acestora exista 2 axe pe fiecare parte a scaunului, vezi fig.3



fig.3

Supportii de sprijin al picioarelor se pozitioneaza din lateral pe axele de ghidare iar apoi se rotesc catre partea din fata a fotoliului rulant pana cand se blocheaza. Ridicati la verticala suportii de sprijin al talpilor, fig.1, reperul "10". Acesta este un aspect important, utilizatorul nu trebuie sa se ridice cu toata greutatea corpului pe suportii "10" deoarece este posibil ca scaunul cu rotile sa se rastoarne peste el. **Urcarea si coborarea de pe scaunul cu rotile se va face cu suportii "10" ridicati la verticala.**

Puneti franele pe rotile din spate. **Urcarea si coborarea din scaunul cu rotile se face cu rotile spate blocate prin sistemul de franare de pe fiecare roata.**

Scaunul cu rotile este gata de utilizare. Va recomandam ca la transferul de pe pat, scaun normal, vas de toaleta etc, sa demontati unul din suportii de sprijin al bratelor, partea ramasa astfel libera o alaturati de exemplu langa pat, blocati rotile scaunului cu ajutorul franelor si faceti transferul prin lateral. Dupa ce s-a realizat transferul suportul de sprijin al bratelor se monteaza in pozitia initiala, puneti la orizontala suportii de sprijin "10" fig.1, sprijiniti talpile si se poate incepe deplasarea.

Supportii de picioare se pot ridica in trepte pana la orizontala sau intr-o pozitie intermediara. Ca sa coborati suportul de sprijin al piciorului, trebuie impinsa maneta "12" fig.1 catre exterior, se deblocheaza suportul si poate fi coborat.

### **Plierea fotoliului rulant**

Pentru depozitare, pentru transport, scaunul cu rotile se poate plia pentru a reduce volumul ocupat. Deblocati si scoateti inaltatorul de spatari "a" fig.4. Pregatirea suportilor pentru sprijinul picioarelor: ridicati la verticala suportii pentru sprijinul talpilor reperul "c" fig.4. Rotiti suportii de sprijin al gambelor reper "b" fig.4 in jurul tijei suportului de sprijin al picioarelor, catre partea din fata a scaunului. Apucati sezutul cu ambele maini in punctele "d" si ridicati

energic, scaunul cu rotile sa va plia. Daca doriti sa reducati mai mult dimensiunea pentru transport, puteti sa demontati sprijinul de picioare.

fig.4

